

MÁXIMA SEGURIDAD



DISPENSADOR DE FORMOL

Modelo

Cod. DSF-003-00-00



AnatHomic Solutions
PATHOLOGY LABORATORY

¿Por qué elegir nuestro Dispensador de Formol?

- ✓ Porque ofrece la máxima seguridad y confort al usuario: cuenta con una potente ventilación trasera y superior, y con ventilación en el cubículo de almacenamiento del formol.
- ✓ Porque es posible configurarlo acorde a las necesidades del usuario
- ✓ Porque su acabado brillante facilita una óptima higienización
- ✓ Porque las paredes están revestidas con material aislante para reducir el ruido al máximo
- ✓ Porque es el único dispensador del mercado que incluye el sistema OZONIC Wash System® para desinfectar las aguas residuales
- ✓ Porque dispone de un contador de filtros que permite maximizar su aprovechamiento
- ✓ Porque es el único dispensador del mercado que utiliza filtros biodegradables y de muy fácil reemplazo
- ✓ Por su conveniente precio de recambio de filtros fabricados por AnatHomic Solutions



CARACTERISTICAS GENERALES


Construcción en acero inoxidable	AISI – 304
Espesores de chapa	1,5 - 2 mm
Dimensiones generales	1500 x 780 x (h)1990 mm
Conexiones: • Conexión eléctrica monofásica 230V 50Hz + tierra • Toma agua caliente 3/8" • Toma agua fría 3/8" • Desagüe PVC Ø40 mm	
Potencia eléctrica	750 W
Panel de control	✓
Interruptor de seguridad (seccionado de corriente)	✓
Pulsador de emergencia (en caso de derrames de formol)	✓
Laterales con ventana (vidrio de seguridad)	Cristal laminar 3+3
Mampara frontal con sistema eléctrico de guillotina	Cristal laminar 4+4
Pies niveladores	✓
Grifo dispensador de formol	✓
Alojamiento inferior aspirado para almacenamiento depósitos formol: • 1 depósito de formol nuevo 10L • 1 depósito de formol usado 25L • Sensores de llenado y vaciado en los depósitos • Válvulas de conexión rápida + antigoteo	✓
Pedal automático dispensador de formol	✓
Grifo médico monomando (agua C/F)	✓
Bandejas perforadas extraíbles	1
Iluminación LED superior	3
Presión de agua de entrada	3-8 bar
Temperatura de funcionamiento	5°C – 45°C

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Doble zona de aspiración: frontal y superior	✓
Motores electroventiladores centrífugos	3
Filtros de carbón activo con impregnación de permanganato potásico	3
Control vida útil de los filtros	✓
Primer aviso previo a cambio de filtros	800 h
Fin de vida útil de los filtros	850 h
Velocidad de aspiración ajustable 10% al 100%	Intervalos de ± 5 %
Capacidad máxima de aspiración	1404 m ³ / h
Velocidad de aspiración en cabina	0.5 - 1.15 m/s
Mampara frontal bajada, distancia a zona de trabajo:	125 mm
Mampara frontal subida, distancia a zona de trabajo:	450 mm


DIMENSIONES

DSF - 003	1500 mm	780 mm	1990 mm
SENO DE LAVADO	600 mm	450 mm	250 mm
SENO DE DISPENSACIÓN	600 mm	450 mm	150 mm

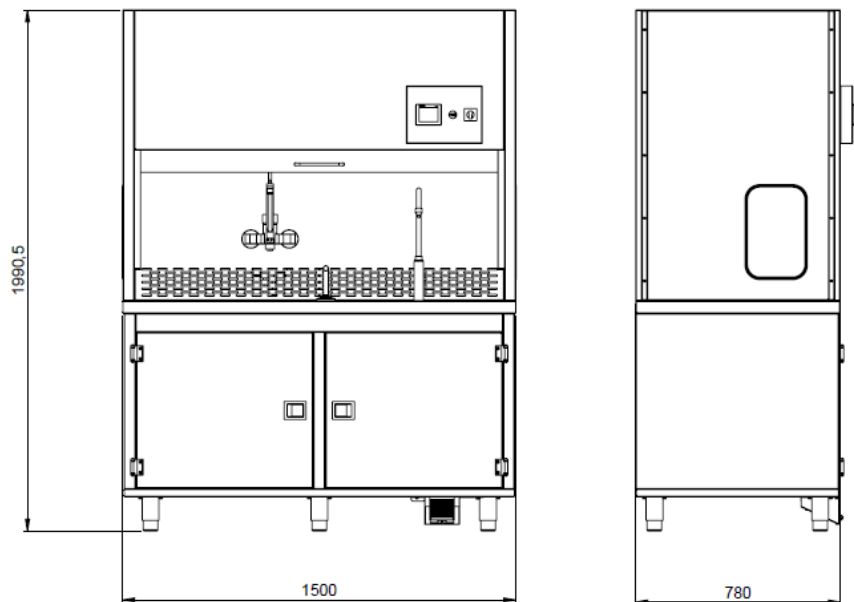

SISTEMA DE DESINFECCIÓN POR OZONO

Todas nuestras estaciones vienen equipadas con OZONIC WASH 4.0, que mediante el poder del ozono para eliminar pesticidas, hongos, materia orgánica, contaminantes y virus. Además, es 100% libre de tóxicos, sin añadir contaminantes al agua ni al entorno.

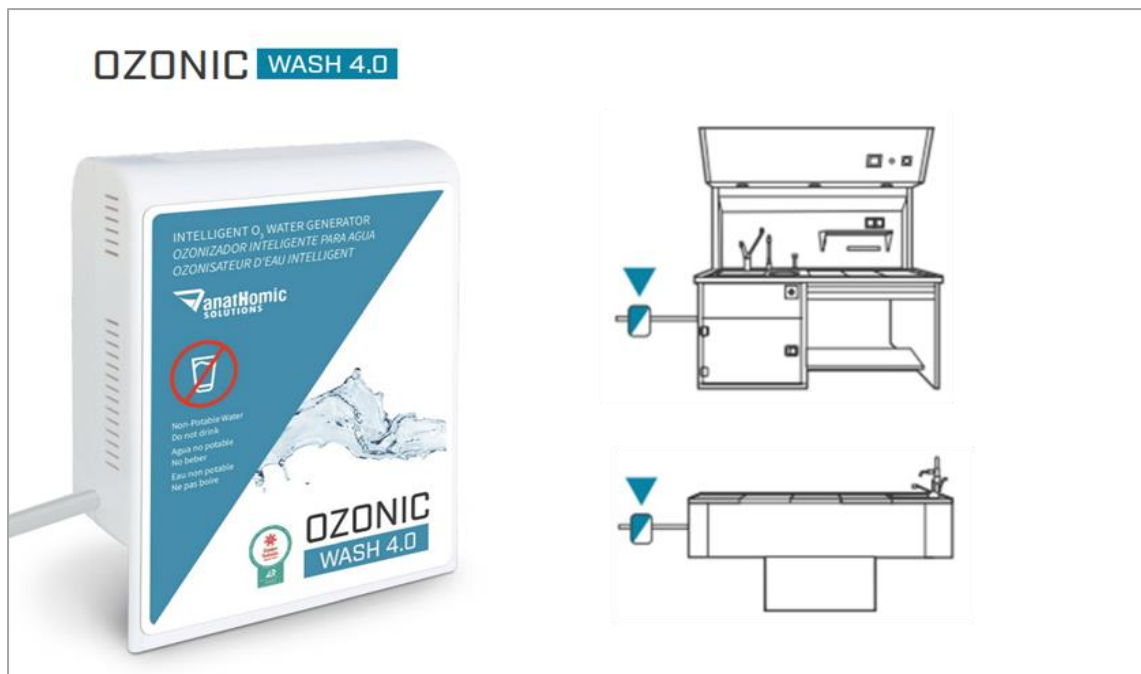

FILTROS BIODEGRADABLES CON PERMANGANATO POTÁSICO

Todas nuestras estaciones vienen equipadas con filtros biodegradables fabricados con olote de maíz y rellenos de permanganato potásico para desinfectar las partículas exhaladas al medio ambiente. Estos filtros son biodegradables y de fabricación propia, lo que permite ofrecer los recambios más competitivos en cuanto a precio y la generación de ahorros en el corto plazo.



EMBALAJES

12-01 Embalaje fitosanitario + funda VCI



CERTIFICACIONES



UNE-EN ISO 9001:2015



UNE-EN ISO 13485:2018



UNE-EN ISO 14001:2015



Tu Seguridad es nuestra Motivación para Diseñar y Fabricar Equipos Innovadores que permitan trabajar en un entorno 100% Libre de Formol.

Esto es parte de nuestro catálogo, en continuo crecimiento con nuevos productos que cumplen altos estándares de calidad.



POLÍTICA DE GARANTÍA

- ✓ Garantizamos, contra todo defecto de fabricación, nuestros productos suministrados **durante 2 años**, a partir de la fecha documentada como de salida de fábrica.
- ✓ Esta garantía de 2 años se aplica siempre que los equipos se utilicen en condiciones normales, de acuerdo con el manual aplicable y las instrucciones de aplicación, limpieza, reparación, manejo de posibles defectos y su supervisión continua.
- ✓ Esta obligación de garantía consiste **EXCLUSIVAMENTE** en la sustitución del producto, o parte de este, reconocido como defectuoso, no incluyéndose los gastos de transporte, instalación, montaje o desmontaje, ni los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
- ✓ El producto o componente entregado en sustitución del defectuoso quedará garantizado en los mismos términos y condiciones aplicables al sustituido.
- ✓ El producto o componente sustituido debe ser devuelto a **AnatHomic Solutions, S.L.U.**, a portes pagados, en un plazo máximo de 15 días, desde la expedición de los productos o componentes sustituidos, pasado el cual **AnatHomic Solutions, S.L.U.** se reserva el derecho a facturar los productos o componentes sustituidos.
- ✓ Los productos no pueden ser modificados. Deben montarse como se indica en los planos del conjunto. La configuración no puede ser alterada.
- ✓ Las anomalías producidas por el transporte deben ser informadas "in situ" y firmadas por el transportista. De lo contrario, no podemos cumplir con la garantía.
- ✓ Toda nuestra gama de fabricados tiene una vida útil de entre 12 y 15 años, siempre que se sigan las instrucciones de uso y mantenimiento preventivos descritos en los manuales de cada equipo.
- ✓ Garantizamos la disponibilidad de recambios: accesorios, partes y piezas durante la vida útil del equipo, siempre que se sigan las instrucciones de uso y mantenimiento preventivos descritos en los manuales de cada equipo.
- ✓ Cualquier ampliación de garantía que pudiera requerir el proceso de venta público o privado, quedará sujeto a negociación y/o a la presentación de documentación específica a convenir entre **AnatHomic Solutions, S.L.U.** y el solicitante.

EXCLUSIONES

- ✓ La garantía quedará anulada si no se ha realizado el pago total de los productos garantizados.
- ✓ La garantía no cubre los daños ocasionados por negligencia en el transporte, almacenamiento o manipulación de los equipos, por operarios o procedimientos externos a **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ Asimismo, la garantía se anulará si no se realizan las operaciones de mantenimiento, supervisión, notificación oportuna de posibles defectos, limpieza y reparación especificadas en el manual de uso o instrucciones proporcionadas por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ La garantía excluye las averías ocasionadas por un uso incorrecto o inadecuado del equipo, o por defectos ocasionados a causa de falta de mantenimiento o de formación del usuario.
- ✓ De la misma forma, se declina toda responsabilidad y garantía derivada de la instalación de los equipos, si no ha sido ejecutada por personal autorizado o siguiendo las instrucciones indicadas por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ **AnatHomic Solutions, S.L.U.** declina toda responsabilidad en demoras justificadas por nuestros proveedores tales como: huelgas, incendios, catástrofes, etc., o modificaciones efectuadas una vez realizado el pedido.
- ✓ Se anula la garantía y la certificación CE de nuestros productos, en el caso de utilización de cualquier tipo de recambio, parte, pieza o consumible que no sea proveído y validado por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**
- ✓ Se anula la garantía en el caso de realización de cualquier tipo de alteración o modificación técnica o de etiquetado de los equipos o sus partes o consumibles por cualquier agente ajeno a no autorizado por **AnatHomic Solutions, S.L.U.**



Scan our
vCard



C/del Ebre, 74 · 08223 Terrassa · Barcelona

T: +34 937 83 74 11 / +34 638 017 655

info@anathomicsolutions.com

www.anathomicsolutions.com

*Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without notice **AnatHomic Solutions SLU** reserves the right to improve this document, or the product described without the obligation to communicate such changes.*

*Nota: Este documento tiene efectos meramente informativos. Cualquier funcionalidad, característica o especificación está sujeta a cambios sin previo aviso. **AnatHomic Solutions SLU** se reserva el derecho de mejorar este documento o el producto descrito, sin obligación de comunicar dichos cambios.*